




PRAXIS Abformung – Protokoll

- Zur Abformung benötigen Sie die Einbringpfosten / Abdruckpfosten, die mit dem Implantat geliefert werden.
- **Für den empfohlenen offenen Abdruck nehmen Sie die „Schraube langer Kopf“** (Bestellnummer: 31920).
- Nach Entfernung der Einheitskappe werden die Abdruckpfosten mit der „Schraube langer Kopf“ handfest auf die Implantate geschraubt und mit einem offenen Löffel abgeformt, bis sich die Schraube durch die empfohlene Wachsabdeckung des offenen Löffels drückt.
- Nach Aushärtung werden diese mit einem Torxschraubendreher entfernt. Die Implantatverbindungen lassen sich selbst bei Divergenzen von bis zu 90° leicht entkoppeln.
- Der laborseitig gefertigte Funktionslöffel muss immer so gearbeitet sein, dass er die Flügel am Abdruckpfosten überdeckt, denn diese Flügel bilden den Verdreherschutz und Retentionsschutz.
- Platzprobleme im Seitenzahnbereich können ganz einfach mit dem kurzen Abdruckpfosten (er ist nur 6mm lang) gelöst werden. Die „Schraube langer Kopf“ gegebenenfalls etwas einkürzen, schlitzen und wie üblich verfahren oder einfach „Schraube kurzer Kopf“ verwenden. (Optional kann mit allen Abdruckpfosten die geschlossene Löffeltechnik angewandt werden).

Torxschraubendreher		
		
Handschraubendreher Torx Bestellnummer 45100	Schraubendreher Torx Stift Bestellnummer 44000	Schraubendreher Torx Ratsche Bestellnummer 45200



Abdruckpfosten



Abdruckpfosten kurz /
Bestellnummer 21420



Schraube langer Kopf /
Bestellnummer 31920