



Arbeitsanleitung Bohren

Arbeitsanleitung CSL-Implantat / HZI-Zirkonoxidimplantat

> 4,1 mm Ø CSL-CLASSISCHE SCHRAUBEN LINIE / HZI-HYDROPHILES ZIRKONOXIDIMPLANTAT





Pilotbohrer 1,5 Art.-Nr. 41215 	Messlehre Art.-Nr. 38000 	Spiralbohrer 2,5 Art.-Nr. 41250 	Spiralbohrer 3,0 Art.-Nr. 41230 	Spiralbohrer 3,4 Art.-Nr. 42340 
---	---	--	--	--

> 5,0 mm Ø CSL-CLASSISCHE SCHRAUBEN LINIE / HZI-HYDROPHILES ZIRKONOXIDIMPLANTAT

Pilotbohrer 1,5 Art.-Nr. 41215 	Messlehre Art.-Nr. 38000 	Spiralbohrer 2,5 Art.-Nr. 41250 	Spiralbohrer 3,0 Art.-Nr. 41230 	Spiralbohrer 3,4 Art.-Nr. 42340 
---	---	--	--	--

Arbeitsanleitung BSL-Implantat

> 3,5 mm Ø BSL-BIOLOGISCHE SCHRAUBEN LINIE

Pilotbohrer 1,5 Art.-Nr. 41215 	Messlehre Art.-Nr. 38000 	Spiralbohrer 2,5 Art.-Nr. 41250 	Spiralbohrer 3,0 Art.-Nr. 41230 Endbohrer bei equigingivaler Positionierung 	Versenker 3,5 Art.-Nr. 43320 Bei equicrestaler Positionierung 
---	---	--	---	--





> 4,1 mm Ø BSL-BIOLOGISCHE SCHRAUBEN LINIE

Pilotbohrer 1,5 Art.-Nr. 41215 	Messlehre Art.-Nr. 38000 	Spiralbohrer 2,5 Art.-Nr. 41250 	Spiralbohrer 3,0 Art.-Nr. 41230 	Spiralbohrer 3,4 Art.-Nr. 42340 
---	---	--	--	--

> 5,0 mm Ø BSL-BIOLOGISCHE SCHRAUBEN LINIE

Pilotbohrer 1,5 Art.-Nr. 41215 	Messlehre Art.-Nr. 38000 	Spiralbohrer 2,5 Art.-Nr. 41250 	Spiralbohrer 3,0 für Schraube 4,1 Art.-Nr. 41230 	Spiralbohrer 3,4 Art.-Nr. 42340 
---	---	--	--	--

> 6,0 mm Ø BSL-BIOLOGISCHE SCHRAUBEN LINIE

Pilotbohrer 1,5 Art.-Nr. 41215 	Messlehre Art.-Nr. 38000 	Spiralbohrer 2,5 Art.-Nr. 41250 	Spiralbohrer 3,0 Art.-Nr. 41230 	Spiralbohrer 3,4 Art.-Nr. 42340 
---	---	--	--	--

Finalbohrer 3,8

Art.-Nr. 44380 CSL
Art.-Nr. 44385 HZI
Endbohrer bei equi-
gingivaler Positionierung



Versenker 4,1

Art.-Nr. 43410
Bei equicrestaler
Positionierung



**HZI-Implantat:
Im D1-Knochen
optional
Gewinde-
schneider.**

Finalbohrer 3,8

Art.-Nr. 44380 CSL
Art.-Nr. 44385 HZI



Spiralbohrer 4,3

Art.-Nr. 43430
Endbohrer bei
equigingivaler
Positionierung



Finalbohrer 4,7/4,8

Art.-Nr. 44470 CSL
Art.-Nr. 44485 HZI
Bei equicrestaler
Positionierung



Versenker 5,0

Art.-Nr. 44500
Bei equicrestaler
Positionierung



**HZI-Implantat:
Im D1-Knochen
optional
Gewinde-
schneider.**

Finalbohrer 3,8

Art.-Nr. 44380
Endbohrer bei
equigingivaler
Positionierung



Versenker 4,1

Art.-Nr. 43410
Bei equicrestaler
Positionierung



Finalbohrer 3,8

Art.-Nr. 44380



Spiralbohrer 4,3

Art.-Nr. 43430



Finalbohrer 4,7

Art.-Nr. 44470
Endbohrer bei
equigingivaler
Positionierung



Versenker 5,0

Art.-Nr. 44500
Bei equicrestaler
Positionierung



Finalbohrer 3,8 für Schraube 4,1

Art.-Nr. 44380



Finalbohrer 4,3 für Schraube 5,0

Art.-Nr. 43430



Finalbohrer 4,7 für Schraube 5,0

Art.-Nr. 44470



Finalbohrer 5,7 für Schraube 6,0

Art.-Nr. 44570
Bei equigingivaler
Positionierung



Versenker 6,0

Art.-Nr. 44600
Bei equicrestaler
Positionierung

