


Gebrauch der Einheilkappen:

Bezüglich der Einheilkappen gibt es folgende grundsätzliche Regel:

Benutzen Sie niemals eine Einheilkappe mit größerem Durchmesser als die Implantat-Plattform!
Einheilkappen für bpisystems-Implantate haben durch ihre spezielle Geometrie sehr scharfe Kanten an der Unterseite! Einheilkappen mit kleinerem Durchmesser als die Implantat-Plattform können für einen Plattformschicht verwendet werden.

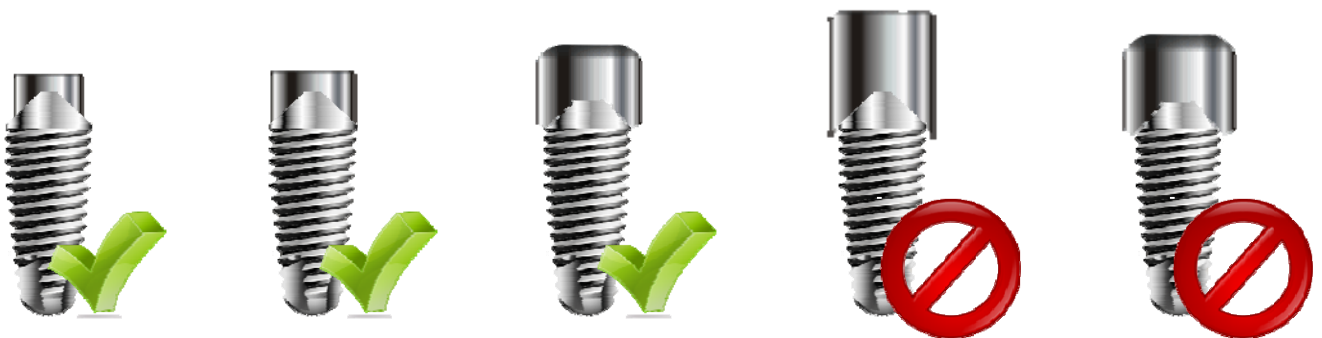

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

Zum Beispiel bei Verwendung eines Implantats mit 6mm Durchmesser setzen Sie die Einheilkappen in den folgenden Schritten:

Erste Einheilkappe	Ø 4.1mm zylindrisch	1.4 or 3.0mm Höhe
Nach einer weiteren Woche	Ø4.1mm konisch	2.0 or 4.0mm Höhe
Nach einer weiteren Woche	Ø5.0mm zylindrisch	1.4 or 3.0mm Höhe
Nach einer weiteren Woche	Ø5.0mm konisch	2.0 or 4.0mm Höhe
Nach einer weiteren Woche	Ø6.0mm zylindrisch	1.4 or 3.0mm Höhe
Nach einer weiteren Woche	Ø6.0mm konisch	2.0 or 4.0mm Höhe